

車いす点検シート

No.

備考	タイプ	一般・軽量・子ども	前回点検以降の貸出有無	有・無
	前回点検日	年 月 日		

点検日	令和 年 月 日	点検者
-----	----------	-----


点検項目

各 部		良否	点 検 内 容	調整	
車 体			1 フレーム各部にゆがみ、変形などないこと		
			2 フレームの開閉がスムーズにできること		
			3 フレーム各部のボルト・ナットの脱落・ゆるみのないこと		
車 輪	駆動輪(後輪)		4 タイヤの空気圧(内部圧)が正常な事		
			5 タイヤの摩耗がないこと、キズ・ヒビがないこと		
			6 車軸のロックナットにゆるみがないこと		
			7 駆動輪の回転がスムーズな事、揺れがないこと		
			8 スポークにゆるみがないこと		
		ハンドリム		9 ハンドリムに亀裂・傷がないこと	
				10 ハンドリム固定ナットの脱落・ゆるみのないこと	
		キャスター(前輪)		11 キャスターフォークの首振りがスムーズなこと	
			12 キャスターフォークのナットにゆるみがないこと		
			13 キャスター車輪の回転がスムーズなこと		
			14 キャスター車軸にゆるみがないこと		
			15 キャスター車輪のゴムに亀裂・破損がないこと		
	ブレーキ	介助ブレーキ		16 介助ブレーキが左右確実に作動すること	
				17 介助ブレーキのレバーが異常に重くないこと	
				18 介助ブレーキを締めたとき、レバーがハンドグリップにあたらないこと	
			19 介助ブレーキのワイヤーネジにゆるみがないこと		
駐車ブレーキ			20 駐車ブレーキが左右確実に作動すること		
			21 駐車ブレーキタックル(金具)のネジがにゆるみがないこと		
シート	座面シート		22 座面シートをフレームに固定するネジに脱落・ゆるみがないこと		
			23 座面シートに破れ等がないこと		
			24 スカートガードとフレーム固定ネジの脱落・ゆるみがないこと		
	背もたれ		25 背もたれをフレームに固定するネジに脱落・ゆるみがないこと		
			26 背もたれに破れ等がないこと		
	シートベルト		27 シートベルトがフレームに確実に固定されていること		
			28 シートベルトのバックル・マジックテープのホールドが正常なこと		
	ステップ	フットレスト		29 ステップ板に亀裂がないこと	
			30 ステップ板の裏側に足を傷つけるササクレ等がないこと		
レッグレスト			31 ステップ板の引き上げボルトにゆるみがないこと		
			32 レッグレスト(脚掛ベルト)の脱落・損傷がないこと		
肘掛(アームレスト)			33 肘掛(アームレスト)の固定ネジの脱落・ゆるみがないこと		

【点検/調整記録】 ※増し締め・調整等をした場合に調整欄に☑をして、内容を本欄に記す (調整不能の際はその旨を記す)

--

< 車いす各部の名称 >

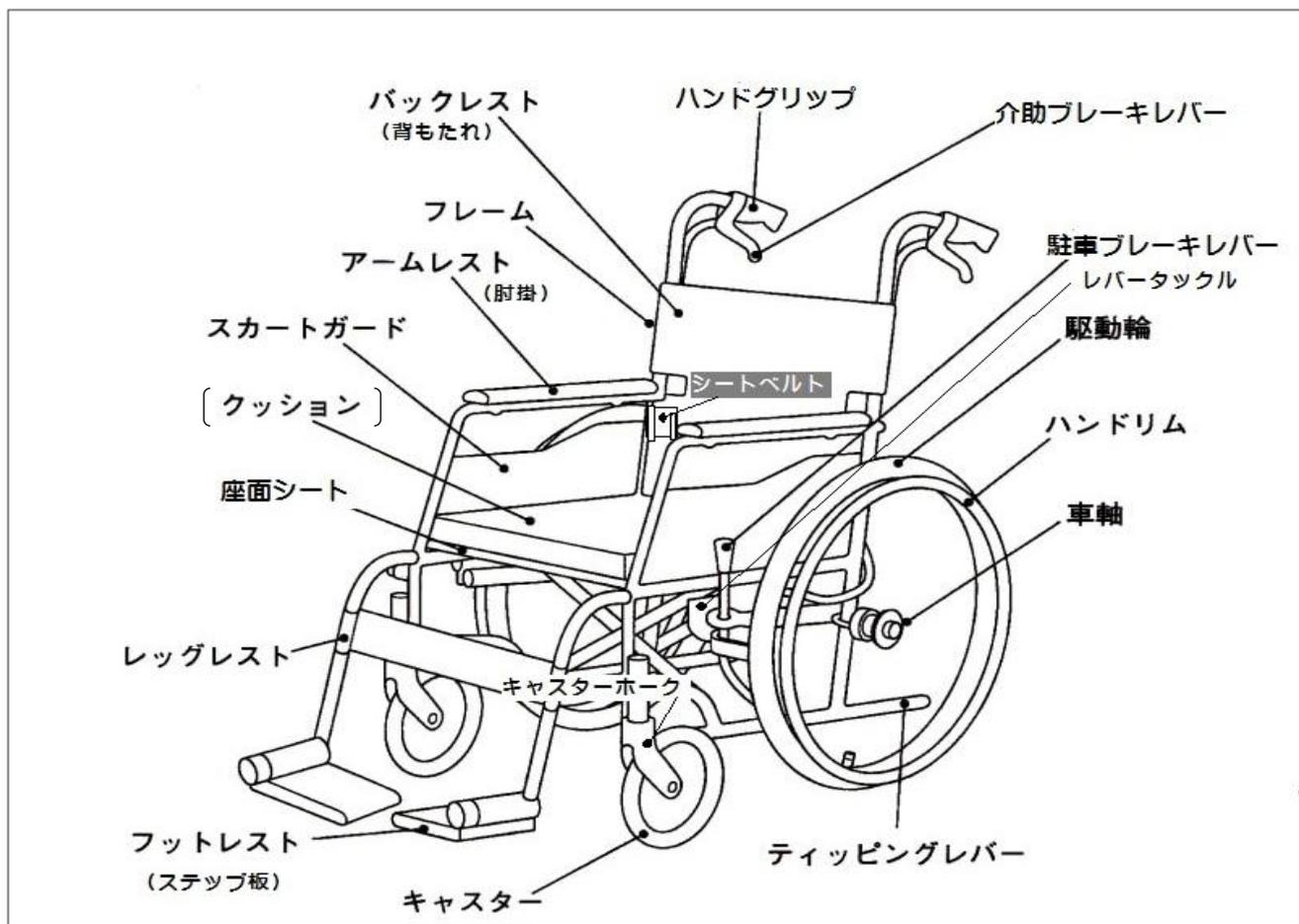

< 貸出用 車いすのタイプ >

● 一般用 (代表的なタイプ)



● 軽量タイプ




● 子ども用



点検項目の写真説明 (一般用の事例)

点検に際しては最初に車いすを裏にして各部を目視・確認します

フレームのボルト類

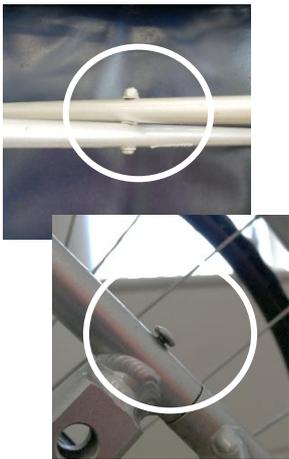

フレームのゆがみ
各車輪の回転



タイヤ摩耗/タイヤ圧



車軸のロックナット



ナット類の締め付け状況は、「ばねワッシャー」等のしまり状態を目視点検


フットレスト引き上げボルト



キャスターホークのナット



レッグレスト/ステップ板

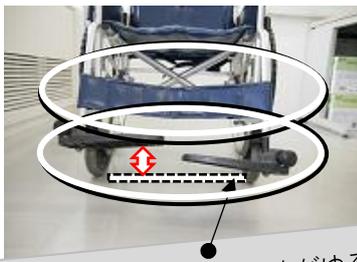

ステップ板引き上げボルトがゆるみ、ステップが下がっていないか



ステップ板の裏側がササクれているか

キャスター車軸のナット



タックルの固定/駐車ブレーキの圧着



介助ブレーキレバーの間隔/ワイヤーネジ



間隔が保てないときは、「ワイヤーネジ」で調整

ハンドリム固定ナット



スポーク



座面シート固定ボルト



シートベルト

